

# SARS-CoV-2

## Hızlı Antijen Testi

### Hastalar için Kısa Kılavuz

Bu kılavuz **SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testini** kullanmanıza yardımcı olacaktır. Bu testi kullanmadan önce, mutlaka hastalar için kullanma talimatını okuyun.

#### Sorunuz mu var?

Sık sorulan sorulara hızlı yanıtları [www.roche.de/ag-patienten](http://www.roche.de/ag-patienten) adresinde bulabilir veya eczacınıza sorabilirsiniz. Veya 08002324820 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri Merkezimizi (Pazartesi'den Cumaya 08:00-18:00) arayın.


## Önemli koruyucu bilgiler

### Uyarı!


- Testi yapmadan önce ellerinizi su ve sabunla yıkayın veya el dezenfektanı kullanın.
- Çubuğun ucunu temiz tutun. Çubuğun ucuna dokunmaktan kaçınınız ve kullanmadan önce herhangi bir yüzeye temas etmediğinden emin olun.
- Numune almak için „Miraclean Technology“ üreticisinin test kiti ile birlikte verilen numune alma çubuklarını kullandığımızdan emin olun (doğru: P/N 93050; kullanılmayacak olan: P/N 96000).

## Test kitinin bileşenleri

### Test şeridi

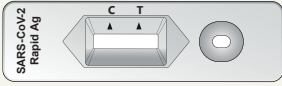



### Ekstraksiyon tamponlu ve dispenser kapaklı tüp

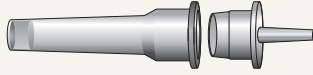

Testi uygulamak için hazır bulundurmanız gereken bileşenler:

- Test şeritleri (tek tek kurutuculu bir ambalaj torbasında paketlenmiştir)
- Ekstraksiyon tamponlu tüp
- Dispenser kapak
- Steril numune alma çubuğu (marka: Miraclean)

### Ambalaj torbası ve kurutucu

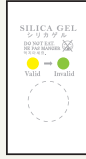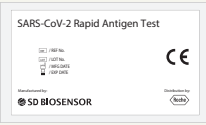

### Steril numune alma çubuğu (marka: Miraclean, P/N 93050)



Ek olarak neye ihtiyacınız var:


- Kronometre

## 1 Testin hazırlanması


1. **SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi** için hasta kullanma talimatını dikkatlice okuyun.



2. Ambalaj torbasının arkasında son kullanma tarihini kontrol edin. Son kullanma tarihi aşıldığında testi kullanmayın.

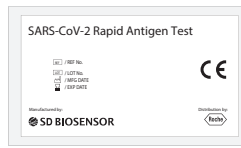

4. Test şeridinin sağlam olduğundan ve kurutucunun durum göstergesinin sarı (= kullanıma uygun) olduğundan emin olun.

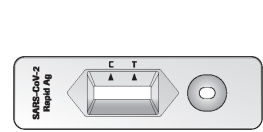

3. Ambalaj torbasını yırtma çizgisinden açın ve test şeridini ve kurutucu torbasını çıkarın.

## 2 Burundan numune alma çubuğunu alın ve hazırlayın

1. Testi yapmadan önce ellerinizi su ve sabunla yıkayın veya el dezenfektanı kullanın.

2. Numune alma çubuğunu ambalajdan çıkarın. Numune alma çubuğunun „pamuklu kısmına“ değil, sadece çubuk kısmına dokunduğunuzdan emin olun.

3. Başınızı hafifçe geriye doğru eğin.

4. „Pamuklu ucu“ burun deliklerinizden birinin içine sokun. Bir direnç hissedene kadar çubuğu yavaşça (damağa paralel şekilde - boğaza doğru değil) yaklaşık 2 cm ileriye itin. Herhangi bir baskı uygulamayın.

5. Pamuklu çubuğu burnun iç kısımlarına 4 kez (toplamda yaklaşık 15 saniye) çevirerek sürtün ve ardından burundan çıkarın.

6. Aynı çubukla 4. ve 5. işlemleri diğer burun deliğinde de tekrarlayın.

**Bilgi:** Her iki burun deliğinden numuneler, aynı numune alma çubuğuyla alınmalıdır.




Sol burun deliği

Sağ burun deliği

Numune alma çubuğunu ekstraksiyon tamponu olan bir tüpe yerleştirin. Tüpü alt kısmından sıkın ve numune alma çubuğunu 10'dan fazla kez ileri geri döndürün.

Tüm sıvıyı çubuktan çıkartmak için çubuğu çıkarırken tüpün kenarlarını sıkıya devam edin.

**UYARI!** Tüp sıkıştırılmazsa, çubuk üzerinde kalan fazla miktarda tampon hatalı sonuçlara yol açabilir.

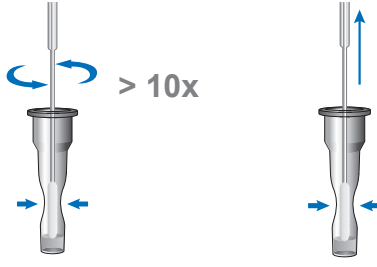

7. Tüpü dispenser kapağı ile sıkıca kapatın. **3 Testin uygulanması** ile devam edin.




### 3 Testin uygulanması

1. Test şeridini düz bir yüzeye yerleştirin.

2. Tüpü, (dikdörtgen sonuç penceresinin değil) yuvarlak işaretli alanın üzerinde dikey şekilde tutun.

3. Alan üstüne tam 4 damla damlatın. Gerekirse, tüpü hafifçe bastırın.

**Bilgi:** Yanlışlıkla 5 damla damlatırsanız da teste devam edebilirsiniz.

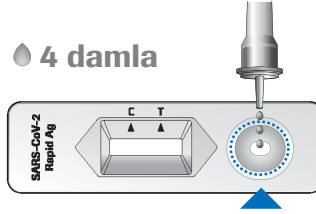


4. Kronometreyi başlatın ve 15 ila 30 dakika sonra test sonucunu okuyun.

**UYARI!** Test sonucu 30 dakikadan daha uzun bir süre sonra okunduğunda, sonuç yanlış olabilir.



### 4 Sonuçların yorumlanması


#### Geçersiz test sonucu

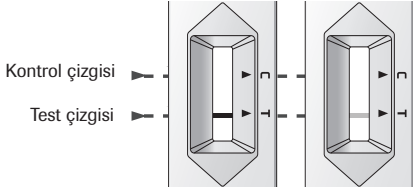

1. Kontrol çizgisi (C) görünmüyorsa, sonuç geçersiz kabul edilmelidir. Test düzgün çalışmıyor olabilir, yeni bir test kiti ile yeniden test yapmanız gerekir.

Yakından bakın: Kontrol çizgisi zayıf olsa bile, test geçerli kabul edilmelidir. Testi doğru uygulamamış olabilirsiniz. Kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun ve testi tekrarlayın. Test sonuçları hala geçersizse, lütfen doktorunuza veya bir COVID-19 test merkezine başvurun.

#### Pozitif test sonucu

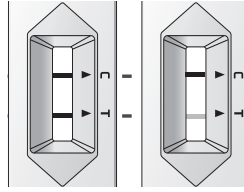


2. Bir kontrol çizgisi (C) ile birlikte bir test çizgisinin (T) var olması sonucun pozitif olduğunu gösterir.

Yakından bakın: Test çizgisi zayıf olsa bile, test pozitif olarak değerlendirilmelidir.

Test sonucunun pozitif olması durumunda, COVID-19 hastası olabilirsiniz. Lütfen derhal doktorunuza/aile hekiminize veya sağlık müdürlüğüne başvurun ve kendinizi izole etmek için yerel yönergeleri izleyin. Gerekirse, doktorunuz PCR ile bir onay testi yaptırmanızı isteyecektir.

#### Negatif test sonucu

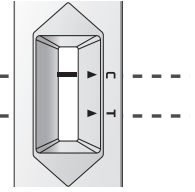

3. Bir kontrol çizgisi (C) varken (ne kadar zayıf olursa olsun), test çizgisinin (T) bulunmaması sonucun negatif olduğu anlamına gelir. Büyük ihtimalle COVID-19 hastası değilsiniz.

Sonuç olumsuz olsa bile tüm korunma ve hijyen önlemlerine uyulmaya devam edilmelidir. Şüphe durumunda (yani kalıcı semptomlarınız varsa veya semptomlarınız daha şiddetli hale gelirse), koronavirüs, enfeksiyonun tüm aşamalarında doğru bir şekilde tespit edilemediğinden testin 1 - 2 gün sonra tekrarlanması önerilir. Belirsizlik durumunda lütfen doktorunuza/aile hekiminize başvurun.